


clinell®

www.clinell.com

ΣΟΥΠΕΡ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ
ΠΑΝΑΚΙ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ

ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΕΩΣ
ΚΑΙ 1 ΛΙΤΡΟ
ΥΓΡΩΝ

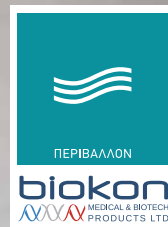

ΠΑΝΑΚΙ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ Clinell®

ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΕΓΧΥΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Αποδεδειγμένα σκοτώνει γνωστούς μικροοργανισμούς που σχετίζονται με εκκρίσεις αίματος, ούρων και κοπράνων

Συμπεριλαμβάνονται Ηπατίτιδα Β & C, HIV, Κλωστηρίδιο difficile, Νοροϊός και πολλά ακόμη. Υψηλής ισχύος οξειδωτική καταστροφή μικροοργανισμών, περιλαμβανομένων και ιών χωρίς περίβλημα και βακτηριακών ενδοσπορίων.

Συμμόρφωση με EN1275, EN1276, EN13704, EN14348, EN14476, EN14561, EN14562 και EN14563.

Απλό, γρήγορο και αποτελεσματικό

Αντικαθιστά τα παραδοσιακά κιτ καθαρισμού εκκρίσεων με χλωρίνη που απαιτούν χρόνο και είναι επικίνδυνα. Η πολύ εύκολη χρήση περιορίζει τα περιστατικά μετάδοσης παθογόνων.

Εύκολη και ασφαλής απόρριψη των λερωμένων πανιών

Η συσκευασία με τα Πανάκια Εκκρίσεων Clinell έχει σχεδιαστεί ώστε όλα τα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου του προστατευτικού ρουχισμού του χρήστη, να μπορούν να απορριφθούν σε μια σακούλα που ξανακλείνει και να τοποθετηθούν σε κατάλληλο μέσο απόρριψης.

Βασισμένο στην τεχνολογία του κλινικά πιο δοκιμασμένου μαντηλιού στον κόσμο

Με παρόμοιο τρόπο με τα Σποροκτόνα Πανάκια Clinell, το υπερ-απορροφητικό Πανάκι Εκκρίσεων Clinell δημιουργεί υπεροξικό οξύ και υπεροξείδιο του υδρογόνου όταν χρησιμοποιείται. Αυτή η αποδεδειγμένη σύσταση είναι επίσης ασφαλής για χρήση σε ούρα, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά προϊόντα που βασίζονται στο χλώριο.

ΠΑΝΑΚΙΑ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ Clinell®

Τα πανάκια Εκκρίσεων Clinell έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίζουν εύκολα και γρήγορα όλες τις εγχύσεις του ανθρώπινου σώματος. Το πακέτο περιέχει ένα υπερ-απορροφητικό πανάκι που παράγει υπεροξικό οξύ και δύο μεγάλα απολυμαντικά πανάκια. Όλα βρίσκονται σε μια σακούλα που ξανακλείνει για εύκολη και ασφαλή απόρριψη μετά τη χρήση.



Τα παραδοσιακά πρωτόκολλα εκκρίσεων σωματικών υγρών απαιτούν την απολύμανση των εκκρίσεων με χλώριο, πριν την ασφαλή απομάκρυνση τους. Αυτή είναι μια χρονοβόρα διαδικασία.

Ένας παράγοντας λειτουργεί ως φράγμα γύρω από τις άκρες των εκκρίσεων, 10.000ppm κόκκινο χλωρίο τοποθετούνται πάνω από την έκκριση και πρέπει να μείνουν εκεί για λίγα λεπτά ώστε να εξουδετερωθούν τα παθογόνα του αίματος.

Στη συνέχεια οι κόκκοι χλωρίου αφαιρούνται με κάποια σκούπα/πανάκι και απορρίπτονται σε ειδική σακούλα βιολογικών απορριμμάτων. Η περιοχή σκουπίζεται στη συνέχεια με απορροφητικές πετσέτες για την αφαίρεση των υπολειμμάτων.

Η διαδικασία διαρκεί τουλάχιστον 10 λεπτά και εκθέτει τον χρήστη σε χημικούς κινδύνους και σε καρκινογόνες τοξικές αναθυμιάσεις.

Γι' αυτό το λόγο η συμμόρφωση των υπαρχόντων καθαριστικών κιτ εκκρίσεων που περιέχουν χλώριο είναι πολύ χαμηλή.

Επιπλέον, τα κιτ χλωρίνης δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε ούρα - απαιτούνται δύο διαφορετικά κιτ, ένα για αίμα και ένα άλλο για ούρα. Τα Πανάκια Εκκρίσεων Clinell® δημιουργήθηκαν ώστε να κάνουν πιο εύκολο τον καθαρισμό των εκκρίσεων του σώματος. Αυξάνουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες, σε αυτή τη συχνή, αλλά ιδιαίτερα αμελή από πολλούς διαδικασία ελέγχου των μολύνσεων, με οικονομικό μάλιστα τρόπο.




1. Φορέστε τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.



2. Σχίστε για να ανοίξετε τη σακούλα.



3. Αφαιρέστε τα πανάκια.

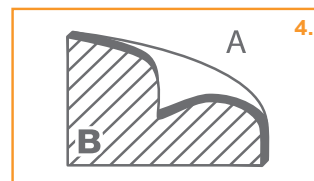

4. Α είναι η ενεργή πλευρά που τοποθετείται πάνω στις εκκρίσεις.



5. Τοποθετήστε την ενεργή πλευρά (Α) επάνω στις εκκρίσεις. Αφήστε να απορροφηθούν για 30 δευτ.



6. Πιέστε επάνω στην πλαστική πλευρά (Β) και μετακινήστε το πανί πάνω από τις εκκρίσεις μέχρι αυτές να απορροφηθούν πλήρως.



7. Τοποθετήστε το λερωμένο πανί πίσω στη σακούλα.



8. Αφαιρέστε ένα απολυμαντικό πανί από τη συσκευασία του.



9. Καθρίστε τη περιοχή της έκκρισης με κίνηση σε σχήμα 'S', από το καθαρό σημείο προς το βρώμικο.



10. Τοποθετήστε το λερωμένο πανί και την άδεια συσκευασία του στη σακούλα.



11. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα βήματα 8-10 με ένα δεύτερο πανί και ξανακλείστε τη σακούλα.



12. Πετάξτε τη σακούλα σε ένα κατάλληλο μέσο απόρριψης.

Clinell® SpillWipes - Πανάκια Εκκρίσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
CSW1	24	ΠΑΚΕΤΟ	40 ΠΑΝΑΚΙΑ	Πανάκια Εκκρίσεων
CSW1D	000	ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ DISPENSER		Επιτοίχιο Δοχείο

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ!

