


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Clinell® Universal πανάκια για απολύμανση & καθαρισμό μη επεμβατικών Ιατροτεχνολογικών συσκευών.


ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.

ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ.


Πως να καθαρίσετε αποτελεσματικά τις επιφάνειες

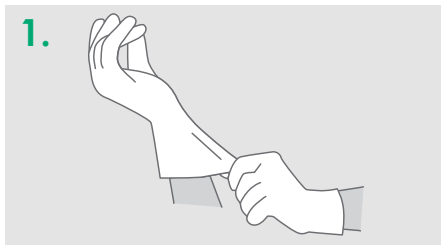


1. Αξιολογήστε την κατάσταση και φορέστε τα ενδεδειγμένα Μέσα Ατομικής Προστασίας. Πάρτε ένα πανάκι απο τη συσκευασία. Χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΑ διαφορετικό πανάκι σε κάθε νεά επιφάνεια.

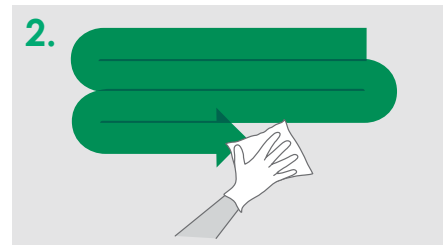

2. Καθαρίστε απο την καθαρή προς τη βρώμικη επιφάνεια, σχηματίζοντας το λατινικό γράμμα **S**, προσέχοντας να μην περάσετε ξανά απο τις ίδιες περιοχές.

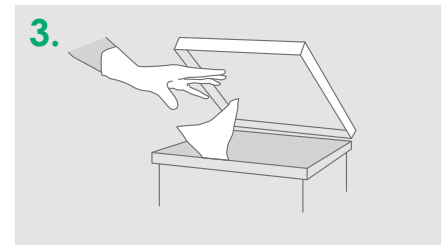

3. Χρησιμοποιήστε καινούργιο πανάκι όταν αυτό στεγνώσει ή βρωμίσει. Πετάξτε το βρώμικο στον κατάλληλο κάδο απορριμάτων.

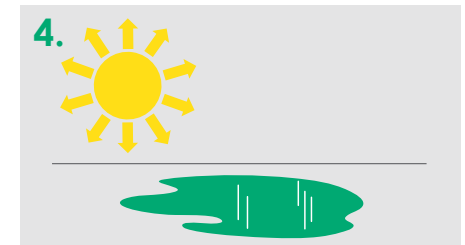


4. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει με φυσικό τρόπο.

Καθημερινός καθαρισμός μη επεμβατικών Ιατροτεχνολογικών συσκευών - επιφανειών και εξοπλισμού

Τα πιστοποιημένα κατά CE Πανάκια Clinell® Universal*, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό και την απολύμανση των επιφανειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, όπως:

Καθαρίστε πάντα μετά απο κάθε χρήση και σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Νοσοκομείου

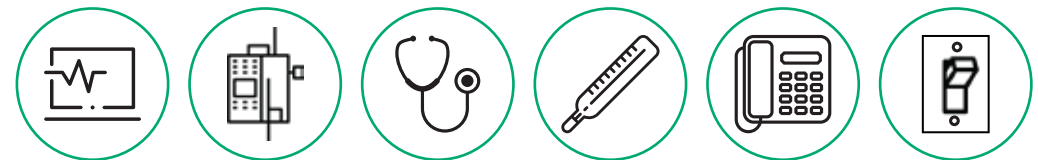

- Μηνήματα Υπερήχων
- Αισθητήρες Οξύμετρου
- Αντλίες Έγχυσης
- Συσκευές Αρτηριακής Πίεσης
- Ακτινολογικός Εξοπλισμός
- Αισθητήρες Doppler
- Στηθοσκόπια
- Συσκευές ECG
- Θερμοκοιτίδες
- Μανσέτες Αρτηριακής Πίεσης
- Οθόνες

* CE0473 Πιστοποιημένα κατα CE Ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατηγορίας IIa.

Πρωτοπόρες Υπηρεσίες
Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης
2108049747 ή info@biokon.gr

Συμπεριλαμβάνει καινοτόμα kit εκπαίδευσης, εξειδικευμένους νοσοκομειακούς εκπαιδευτές, ειδικό υλικό, αφίσες και εγκατάσταση dispenser.

