

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ
& ΑΝΕΣΗ**

ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΘΕΝΗ ΣΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Respiratory Care



IV and Vascular Solutions



Urology



Enteral Care



Κατάλογος προϊόντων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ.

- Επιτυγχάνει την διατήρηση της θέσης του ενδοτραχειακού σωλήνα, σταθεροποιώντας τον σε 3 σημεία.
- Συμβάλει στη συμμόρφωση με τα νοσηλευτικά πρωτόκολλα.
- Επιτρέπει την αποτελεσματική στοματική φροντίδα, καθώς διατηρεί την πρόσβαση στη στοματική κοιλότητα.
- Επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση του σωλήνα από τη μία άκρη του στόματος στην άλλη, μειώνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού των χειλιών από τη συνεχή πίεση.
- Είναι κατασκευασμένο και σχεδιασμένο από ειδικά υλικά ώστε να μην τραυματίζει τον ασθενή. Δεν περιέχει φυσικό ελαστικό Latex.
- Ένα μέγεθος για όλους τους ασθενείς.

ENDOTRACHEAL TUBE HOLDERS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΚΕΤΟ
270	Stabilock	Για ενδοτραχειακούς σωλήνες με διάμετρο: 7.0mm-10.0mm	10 TMX
280	BreezeLock®	Για ενδοτραχειακούς σωλήνες με διάμετρο: 7.0mm-10.0mm	10 TMX



ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΜΕΡΗ:

1. Εμποτισμένο μαντηλάκι προετοιμασίας του δέρματος.

Ελαχιστοποιεί τους τραυματισμούς που μπορεί να προκληθούν από τη συνεχή χρήση αυτοκόλλητων επιθεμάτων

2. Αυτοκόλλητο επίθεμα που λειτουργεί ως βάση στήριξης.

Έχει σχεδιασμό με δυνατότητα προσαρμογής στο πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά του ασθενούς (4 επιλογές επικόλλησης). Είναι φιλικό στο ευαίσθητο δέρμα και δεν αφήνει υπολείμματα που προκαλούν ερεθισμό κατά την αφαίρεσή του.

3. Ιμάντας στερέωσης με κανάλι στήριξης του ενδοτραχειακού σωλήνα.

Ο ιμάντας στερέωσης προσκολλάται με velcro στην αυτοκόλλητη βάση και γύρω από το λαιμό του ασθενούς. Έχει ειδική επένδυση που απορροφά την υγρασία, μειώνοντας τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος. Φέρει σταθερό άγκιστρο καθήλωσης του ενδοτραχειακού σωλήνα (Stabilock®) ή μετακινούμενο άγκιστρο Breezlock® που επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση του σωλήνα, χωρίς την αποκόλλησή του από την βάση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ

- Επιτυγχάνει τη διατήρηση της θέσης του σωλήνα τραχειοστομίας.
- Προσαρμόζεται ευκολά στην περίμετρο του λαιμού.
- Διαθέτει ειδική επένδυση που απορροφά την υγρασία, μειώνοντας τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος.
- Έχει ειδικού σχεδιασμού άκρα για γρήγορη και εύκολη εφαρμογή σε οποιοδήποτε μέγεθος σωλήνα τραχειοστομίας.
- Παρέχει τη δυνατότητα για εύκολη επανατοποθέτηση του ενδοτραχειακού σωλήνα.
- Είναι κατασκευασμένο από ελαστικό υλικό διευκολύνοντας τυχόν ανατακλαστικές κινήσεις που προκαλούνται από βήξιμο, δε σφίγγει τυχόν οίδημα, ενώ διασφαλίζει σταθερή εφαρμογή και ασφάλεια στη χρήση. Δεν περιέχει φυσικό ελαστικό Latex.

TRACHEOSTOMY TUBE HOLDERS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΚΕΤΟ
240	Blue®	Πλάτος 2,54cm για περίμετρο λαιμού μέχρι: 49,5cm	10 TMX
242	PediPrints® παιδικά σχέδια	Πλάτος 1,91cm για περίμετρο λαιμού μέχρι: 23cm	10 TMX



ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ.

- Επιτυγχάνει τη διατήρηση της θέσης του ρινογαστρικού σωλήνα.
- Διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό που με διπλή σπειροειδή επικόλληση στον καθετήρα σταθεροποιεί χωρίς να τραυματίζει, συμβάλλοντας στην πρόληψη από ερεθισμούς, προλαμβάνοντας νέκρωση του δέρματος. Διαθέτει άκρα χωρίς κόλλα για εύκολη αφαίρεση χωρίς να κολλά στα γάντια.
- Είναι προσηματισμένο και δεν χρειάζεται η χρήση ψαλιδιού.
- Προσαρμόζεται σε όλα τα μεγέθη/σχήματα μύτης.
- Είναι κατασκευασμένο από διαπνεόμενο υλικό, ασφαλές και φιλικό προς το δέρμα.

NASOGASTRIC TUBE HOLDER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΚΕΤΟ
160	Ενηλίκων	50 TMX
161	Παιδιατρικό	50 TMX



160



161

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ TRANSDUCER

- Επίπεδη και ασφαλής πλατφόρμα για ως και τρία transducer.
- Εξασφαλίζει την ορθή ανάγνωση μετρήσεων κυματομορφής και αντιστοίχιση αριθμητικής απεικόνισης.
- Έχει άψογη προσαρμογή στο χέρι του ασθενούς.
- Διαθέτει ρυθμιζόμενους γάντζους με χρωματική κωδικοποίηση.
- Μειώνει το χρόνο της επανατοποθέτησης και της μεμονωμένης στερέωσης των transducers.

TRANSDUCER HOLDER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΚΕΤΟ
620	3-θέσεων	one-size	10 TMX



620

ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΘΗΤΗΡΑ FOLEY.

- Είναι κατάλληλο για όλους του καθετήρες foley συμπεριλαμβανομένων επικαλυμμένων καθετήρων και καθετήρων σιλκόνης.
- Είναι άνετο και ιδανικό για χρήση σε ασθενείς με σύντομο κύκλο χρήσης του καθετήρα. Εφαρμόζεται άμεσα και εύκολα.

FOLEY CATHETER HOLDER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΑΚΕΤΟ
150	Hold-n-Place® Adhesive Patch	one-size	10 TMX



150
Hold-n-Place®

Οδηγός Χρήσης


Στήριγμα ενδοτραχειακού σωλήνα

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ 7,0- 10,0 mm

Dale® BreezeLock®

Οδηγίες εφαρμογής

- Πριν την εφαρμογή: α) καθαρίστε τον ενδοτραχειακό σωλήνα. Αφήστε τον να στεγνώσει.
β) Με το εμποτισμένο μαντηλάκι καθαρισμού δέρματος προετοιμάστε την περιοχή όπου θα εφαρμοστεί η αυτοκόλλητη βάση. Αφήστε το δέρμα να στεγνώσει.
- Εφαρμόστε την αυτοκόλλητη βάση. **(A 1-3)**
- Τοποθετήστε τον IMANTA στερέωσης πιέζοντας τον πάνω στην αυτοκόλλητη ΒΑΣΗ, φροντίστε ώστε η ΡΑΓΑ να είναι κεντραρισμένη πάνω από το στόμα του ασθενούς. **(B)**
- Ανοίξτε τις ταινίες Velcro που υπάρχουν στα δύο άκρα του IMANTA και τυλίξτε τον γύρω από το κεφάλι, ακριβώς κάτω από τα αυτιά. Κλείστε τις ταινίες Velcro στην εξωτερική πλευρά του IMANTA.
- Ανασηκώστε το ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ. Τοποθετήστε το ΚΑΝΑΛΙ πάνω από τον ενδοτραχειακό σωλήνα. Κλείστε το ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ.
- Βήματα στερέωσης του ενδοτραχειακού σωλήνα στο ΚΑΝΑΛΙ με ταινία:
 - με τον σωλήνα να κρέμεται ελεύθερα κάτω από το ΚΑΝΑΛΙ, τυλίξτε ένα κομμάτι 15cm από την παρεχόμενη ταινία 1 φορά γύρω από τον σωλήνα. **(C)**
 - Πιέστε το ΚΑΝΑΛΙ προς τα κάτω, πάνω στον ενδοτραχειακό σωλήνα.
 - Τυλίξτε καλά την ταινία με σπειροειδή κίνηση γύρω από τον σωλήνα και το ΚΑΝΑΛΙ. **(D)**
 - **Προαιρετικό:** Συνεχίστε να τυλίγετε την ταινία γύρω από τον ενδοτραχειακό σωλήνα κατά τουλάχιστον 2,5 cm πέρα από την άκρη του ΚΑΝΑΛΙΟΥ.
- Βεβαιωθείτε ότι ο IMANTAS έχει στερεωθεί καλά, ξαναρυθμίζοντας τις ταινίες Velcro όσο χρειάζεται.
 - Αλλάξτε την ταινία στο ΚΑΝΑΛΙ όποτε είναι απαραίτητο.
 - Αλλάξτε τη συσκευή μετά από 3 ημέρες ή συντομότερα, εάν χρειάζεται.
 - Για να αποφευχθεί εξέλκωση ή εκδορές του δέρματος, εκτιμήστε την κατάσταση του δέρματος του ασθενή και την ιατρική του κατάσταση πριν από την εφαρμογή. Να παρακολουθείται καθημερινά ή συχνότερα.

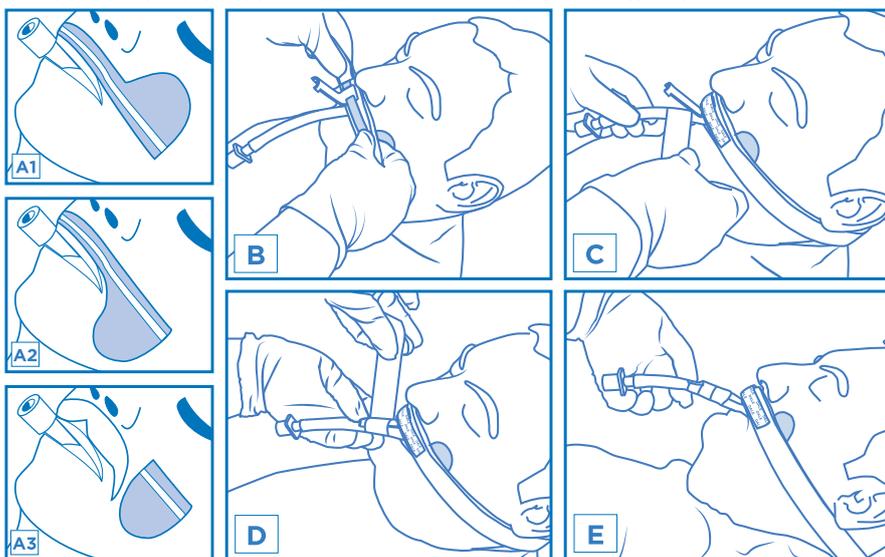

Περιεχόμενα: 1 από έκαστο - IMANTA, αυτοκόλλητη ΒΑΣΗ 273, ρολό ταινίας, μαντηλάκι προετοιμασίας δέρματος.

Αλλαγή θέσης του σωλήνα


Κρατώντας το τυλιγμένο με ταινία ΚΑΝΑΛΙ με το ένα χέρι, ανασηκώστε το ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ από τη ΡΑΓΑ. Σύρετε το ΚΑΝΑΛΙ για να μετακινήσετε τον σωλήνα στην επιθυμητή θέση. Πιέστε ξανά το ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑ πάνω στη ΡΑΓΑ για να ασφαλίσετε τον σωλήνα στη νέα του θέση.

Αφαίρεση

Η συσκευή θα πρέπει να αφαιρείται με προσοχή, ώστε να μην τραυματιστεί το δέρμα. Εφαρμόστε ξανά προστατευτικό δέρματος εάν πρόκειται να τοποθετηθεί άλλη συσκευή.

Συστάσεις

- Η Dale συνιστά να αλλάζετε συχνά τη θέση του ενδοτραχειακού σωλήνα ώστε να αποτραπεί τραυματισμός των χειλιών και των υποκείμενων ιστών λόγω της παρατεταμένης πίεσης.
- Η Dale συνιστά ιδιαίτερα να υποστηρίζεται ο σωλήνας αερισμού ώστε να περιορίζεται η πίεση που ασκείται στο πρόσωπο του ασθενή.

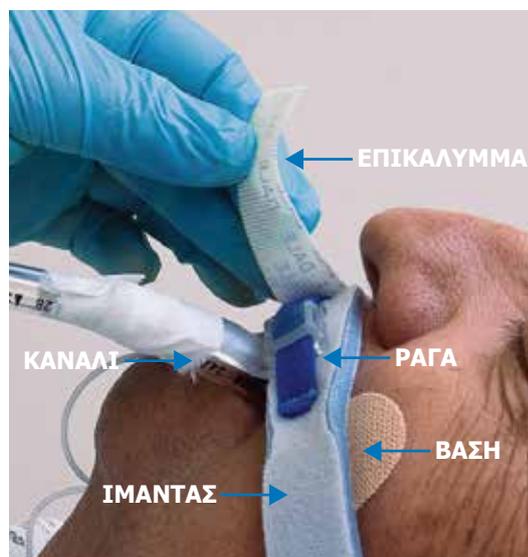

Σημειώσεις:



Σκανάρετε για να δείτε όλες τις οδηγίες χρήσης

